

サーモフォーカス[®]プロ

医療機器承認番号:22100BZX00092000

皮膚赤外線体温計

スプリングキャンペーン

キャンペーン期間 2014年 2/24~5/31

簡単

額から体温を直ぐに測定

正確

誤差わずか
±0.2℃

スピーディ

わずか3秒測定!

LED

目に安全な
LEDを使用

清潔

非接触型
のため清潔

衝撃に強い!

日本向けに製造された強度の高い製品です。

ストラップ付き




~~¥28,000~~ (税別)

キャンペーン期間限定価格
2014年 2/24~5/31

¥14,800 (税別)



サーモフォーカス[®]プロ

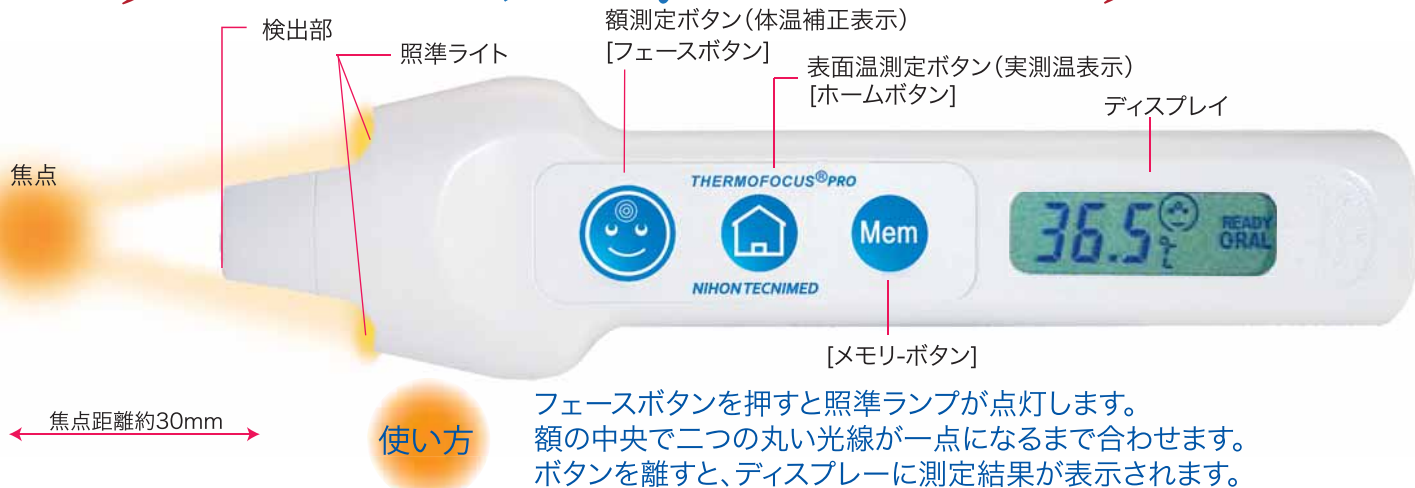

使い方

フェイスボタンを押すと照準ランプが点灯します。額の中央で二つの丸い光線が一点になるまで合わせます。ボタンを離すと、ディスプレイに測定結果が表示されます。

動作原理

表面温測定は、人体表面から出ている5~14 μ mの赤外線を検出部でとらえ、また内蔵サーミスターで室温を測定し、その2つのデータから体表面温度に変換し表示します。体温補正表示は、額の表面温をもとに内蔵されているデータテーブルを用い変換補正を行い表示します。

品番	品名	キャンペーン価格(税抜) 2014年 2/24~5/31
8-8007-21	サーモフォーカスプロ	14,800円

QCSを使うと待つ必要がなく即測定可能

サーモフォーカスプロは、緊急時、パンデミック時、又は直ぐ測定する必要がある時に、QCSで周辺温度を体温計に自動セットするだけで即座に使用できます。サーモフォーカスプロは、周辺温度と同じ温度になるまで待つ必要はありません。

3種の体温設定が可能

液窩温(日本の標準測定法)、舌下温(世界の標準測定法)、直腸温(深部体温に最も近い温度)の中で測定したい予測モードを簡単に設定できます。額は体温変化を測定するのに理想的な測定部位です。

自動的に電源をオフ

サーモフォーカスプロは、電源のオフが設定できます。使用後に電源をオフにするか、或いは使用後約4時間で電源をオフにするかを設定でき、電源を節約します。

メモリー機能

サーモフォーカスプロは、9個の測定値を保存できます。また、“メモリーボタン”を押すだけで簡単にメモリーを呼び出せます。

日本テクニメッド社 他の商品:

サーモフォーカス[®]プロ
ビジオフィカス[®]



主な仕様

項目	仕様
体温測定範囲	34.0~42.5°C (フェイスボタン)
表面温測定範囲	1.0~55.0°C (ホームボタン)
使用環境温度	16~40°C 30~85%RH(ただし結露なきこと)
表面温度の測定	1.0~55.0°C 30~85%RH(ただし結露なきこと)
周辺温度の表示	5°C~40°C
最小表示単位	0.1°C
精度	±0.3°C (34.0~35.9°C) * ±0.2°C (36~39°C) * ±0.3°C (39.1~42.5°C) * ±1.0°C (42.3~55°C) ±0.3°C (20.0~33.9°C) ±1.0°C (1.0~19.9°C) (備考) *: ASTM E 1965-98に適合
照準ライト	色のついた2個のLEDによる
ライト点滅	検温中は照準ライト点滅で告知
警報機能	電池切れマーク、使用温度範囲外表示、電磁場影響の表示、自動的安定化 (AQCS)、時間表示
測定	2~3秒で測定を完了し表示する
電池交換	単4アルカリ電池4本交換可能、DC 6V
外形寸法	長さ156mm x 高さ40mm x 厚さ22mm
重量	90g (電池を含む)
付属品	ストラップ・単4アルカリ電池×4本

電磁両立性 (EMC) は、EN60601-1-2:2001 に適合

製造販売元: 株式会社日本テクニメッド

取扱店:

アズワン株式会社 **navis**
ナビス営業部

商品の内容に関するお問合せ専用窓口 <TEL> ☎ 0120-711-875
カスタマー相談センター <FAX> ☎ 0120-700-763
<URL> <http://help.as-1.co.jp/q/>

※仕様・金額等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問合せ先: